

# DyBac PR

Desinfetante hospitalar  
para superfícies fixas e artigos não críticos

USO ASSISTÊNCIA À SAÚDE

## Boletim Técnico

### Informações Técnicas

#### Características:

- Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos a base de biguanida e quaternário de amônio.
- **DyBac PR** foi especialmente desenvolvido para limpeza e desinfecção em ambientes hospitalares, mesmo em presença de matéria orgânica.
- **DyBac PR** pode ser utilizado na limpeza terminal, na limpeza concorrente e na desinfecção de áreas críticas, semi críticas e não críticas.
- Não deixa cheiro, não é corrosivo e não agride pisos tratados.

#### Eficácia de Ação Antimicrobiana:

*Pseudomonas aeruginosa*, *Salmonella choleraesuis*  
*Staphylococcus aureus*, *Acinetobacter*, KPC – *Klebsiella pneumoniae* e H1N1 – Influenza A

#### Utilização:

Na limpeza terminal e concorrente; e na desinfecção hospitalar de superfícies fixas e artigos não críticos em áreas críticas, semi críticas e não críticas.

#### Características Físico-Químicas:

Aspecto Físico: ..... Líquido límpido  
Cor: ..... Incolor  
pH Puro: ..... 6,0 a 8,0  
Classe de Risco: ..... Baixo Risco

#### Composição:

Ativos, tensoativo não iônico e veículo.

#### Princípio Ativo:

Quaternário de Amônio  
Biguanida Polimérica

#### Validade do Produto:

24 meses após a data de fabricação.

#### Modo de Usar:

**DyBac PR** deve ser diluído em água a 0,5% ou 1:200 (5 ml por litro de solução). Com tempo de contato de 10 minutos antes do enxágue. O enxágue é dispensado em superfícies que não tem contato direto com alimentos, como pisos e paredes. Para diluição com precisão, utilizar sistema de dosagem automática ou frasco dosador.

#### Precauções de uso:

**CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**CUIDADO:** Não ingerir. Produto irritante para os olhos, pele e mucosas. Não misturar com outros produtos. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Telefone de emergência (CEATOX): 0800-722-6001.

#### Conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente coberto e seco. Evitar temperaturas extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito.

#### Embalagens:

Bombona de 5 litros  
Frasco dosador de 1 litro

#### Registros Oficiais:

Produto Registrado na ANVISA Nº 319660065

Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das suas necessidades específicas de limpeza e tratamento.

Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.

Rua Domênico Marini, 1646 - Bairro Fátima, Bento Gonçalves - RS - CEP 95702-300  
CNPJ 00.987.668/0001-74 - Inscrição Estadual 010/0080936 - Aut. Func. MS: 3.01966-1  
Fone (54) 3454.9800 - www.dety.com.br

Revisado em 04/2024

**dety**  
higiene eficiente