

# Dety 2020

Desinfetante hospitalar  
para superfícies fixas e artigos não críticos

USO ASSISTÊNCIA À SAÚDE

## Boletim Técnico



### Informações Técnicas

#### Características:

- Desinfetante para uso hospitalar em superfícies fixas e artigos não críticos, a base de álcool 70%.
- Ação antisséptica e desinfetante por possuir características microbicidas aos microrganismos mais frequentes nesse meio.
- A associação de seu princípio ativo com emolientes, o torna menos irritante para a pele.
- Fácil aplicação na limpeza concorrente e na limpeza terminal das unidades de internação.

#### Eficácia de Ação Antimicrobiana:

*Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis* e *Pseudomonas aeruginosas*.

#### Utilização:

Uso em ambientes, pisos, paredes, mobiliários e artigos (objetos, equipamentos e acessórios) utilizados exclusivamente em hospitais e estabelecimentos relacionados com o atendimento à saúde.

#### Características Físico-Químicas:

Aspecto Físico: ..... Líquido límpido incolor  
pH (puro a 25°C): ..... 7,0 a 7,5  
Grau de Risco: ..... Inflamável

#### Composição:

Solvente, emoliente, sequestrante e veículo.

#### Princípio Ativo:

Álcool Etílico 70%.

#### Validade do produto:

06 meses após a data de fabricação

#### Modo de Usar:

Aplicar o produto puro com auxílio de um pulverizador. Deixar secar naturalmente. Iniciar a limpeza de cima para baixo (paredes) e pelos cantos (pisos).

#### Precauções de uso:

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**CUIDADO: Produto inflamável.** Mantenha afastado do calor, fiação, chama aberta e superfícies quentes. Não fume. Não ingerir. Produto irritante para os olhos, pele e mucosas. Não misturar com outros produtos. Não misturar com outros produtos. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Telefone de emergência (CEATOX): 0800-722-6001.

#### Conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente coberto e seco. Evitar temperaturas extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito.

#### Embalagens:

Frasco de 20x1L  
Bombona de Polietileno 2x5L

#### Registros Oficiais:

Produto Registrado na ANVISA Nº 319660043

Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das suas necessidades específicas de limpeza e desinfecção.



Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.

Rua Domênico Marini, 1646 - Bairro Fátima, Bento Gonçalves - RS - CEP 95702-300  
CNPJ 00.987.668/0001-74 - Inscrição Estadual 010/0080936 - Aut. Func. MS: 3.01966-1  
Fone (54) 3454.9800 - www.dety.com.br

Revisado em 01/2025

**dety**  
higiene eficiente