

Dety 2014

Desinfetante hospitalar clorado
para superfícies fixas e artigos não críticos

USO ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Boletim Técnico



Informações Técnicas

Características:

- Desinfetante hospitalar à base de Hipoclorito de Sódio, com 1% de Cloro Ativo.
- Na dose de uso, desenvolve 10.000 ppm de cloro ativo.
- Tem propriedades bactericidas, virucidas, fungicidas, tuberculicidas, algicidas e esporicidas.
- Desinfeta mesmo em presença de matéria orgânica.

Eficácia de Ação Antimicrobiana:

Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis e Pseudomonas aeruginosas.

Utilização:

Utilizado em hospitais, clínicas médicas e odontológicas, casas e ambientes ligados a saúde.

Indicado para desinfecção de superfícies fixas, tais como: piso, paredes e mobiliário. A aplicação de DETY 2014, não é recomendada em superfícies metálicas devido a problemas de oxidação causada pelo Cloro. Incompatível com os seguintes materiais: metais, tecidos coloridos e sabões em geral.

Características Físico-Químicas:

Aspecto Físico:..... Líquido transparente
Cor: Levemente amarelada
pH (Puro a 25°C):..... 12,0 a 13,0
Densidade (g/ml):..... 0,95 a 1,05
Grau de Risco: Irritante

Composição:

Hipoclorito de sódio, alcalinizantes e veículo.

Princípio Ativo:

Cloro ativo 1%

Validade do Produto :

6 meses após a data de fabricação

Modo de Usar:

O produto deverá ser utilizado puro, sem diluições. Deixar o produto em contato com as superfícies a serem desinfetadas por no mínimo 10 minutos. Após enxaguar com água, se necessário.

Precauções de uso:

PERIGO: PRODUTO CORROSIVO

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.

CUIDADO: Não ingerir. Produto irritante para os olhos, pele e mucosas. Não misturar com outros produtos. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Telefone de emergência (CEATOX): 0800-722-6001.

Conservação:

Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Manter o produto em temperatura ambiente. Evitar temperaturas extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito.

Embalagens:

Bombona de polietileno 2x5L

Frasco plástico de 1 kg

Registros Oficiais:

Produto Registrado na ANVISA Nº 319660058

Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das suas necessidades específicas de limpeza e desinfecção.



Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.

Rua Domênico Marini, 1646 - Bairro Fátima, Bento Gonçalves - RS - CEP 95702-300
CNPJ 00.987.668/0001-74 - Inscrição Estadual 010/0080936 - Aut. Func. MS: 3.01966-1
Fone (54) 3454.9800 - www.dety.com.br

Revisado em 01/2025

dety
higiene eficiente