

# Dety DLL 2013

Desinfetante hospitalar  
para superfícies fixas e artigos não críticos

USO ASSISTÊNCIA À SAÚDE

## Boletim Técnico

### Informações Técnicas

#### Características:

- Desinfetante de uso hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos a base de quaternário de amônio de 5ª geração.
- O quaternário de amônio de 5ª geração é uma mistura balanceada de cloreto de alquil dimetil benzil amônio e cloreto de didecil dimetil amônio.
- Tem efeito bactericida, fungicida, algicida e virucida.
- Econômico no uso e com custo final altamente competitivo.
- Limpa e desinfeta ao mesmo tempo.
- Bactericida catiônico de amplo espectro.
- Não deixa odor residual.
- Não sofre influência da dureza d'água.
- Poder espumante moderado.
- Produto biodegradável.

#### Eficácia de Ação Antimicrobiana:

*Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis* e *Pseudomonas aeruginosas*.

#### Utilização:

**Assistência à Saúde:** Para desinfecção em ambientes coletivos públicos ou privados, em lugares de uso comum, em objetos e superfícies inanimadas em instituições de assistência à saúde, tais como: hospitais, clínicas, lavanderias hospitalares, consultórios entre outros.

#### Características Físico-Químicas:

Aspecto Físico..... Líquido transparente  
Cor: ..... Incolor  
pH (Puro a 25°C):..... 8,0 a 9,0  
Densidade (g/ml):..... 0,95 a 1,05  
Matéria ativa (teor catiônico %):..... 17,5 a 18,5  
Grau de Risco: ..... Irritante

#### Composição:

Tensoativos catiônico e não-iônico, sequestrante e veículo.

#### Princípio Ativo:

Cloreto de alquil dimetil benzil amônio

#### Validade do Produto :

24 meses após a data de fabricação

#### Modo de Usar:

Diluir em água à 2% (20 ml por litro de solução). Aplicar na superfície a ser desinfetada e deixar agir por no mínimo 10 minutos. O enxágue é dispensado em superfícies que não tem contato direto com alimentos, como pisos e paredes.

#### Precauções de uso:

**CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

**CUIDADO:** Não ingerir. Produto irritante para os olhos, pele e mucosas. Não misturar com outros produtos. Usar luvas para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos. Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Telefone de emergência (CEATOX): 0800-722-6001.

#### Conservação:

Manter o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. Manter o produto em temperatura ambiente. Evitar temperaturas extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito.

#### Embalagens:

Bombona de Polietileno de 2x5L

#### Registros Oficiais:

Produto registrado na ANVISA Nº 319660034

Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das suas necessidades específicas de limpeza e desinfecção.



Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.

Rua Domênico Marini, 1646 - Bairro Fátima, Bento Gonçalves - RS - CEP 95702-300  
CNPJ 00.987.668/0001-74 - Inscrição Estadual 010/0080936 - Aut. Func. MS: 3.01966-1  
Fone (54) 3454.9800 - www.dety.com.br

Revisado em 01/2025

**dety**  
higiene eficiente