

DLL 1107 HLC

Detergente para uso geral

USO ASSISTÊNCIA À SAÚDE

Boletim Técnico

Informações Técnicas

Características:

- Detergente neutro de uso geral, isento de corante e de fragrância, ideal para limpeza de vidrarias e utensílios em laboratórios de hospitais, clínicas e laboratórios de análises clínicas.
- Matéria ativa neutra conferindo às superfícies delicadas, de qualquer natureza, segurança total.
- Emulsiona completamente qualquer tipo de gordura devido a alta carga de tensoativo presentes na sua composição.
- Produto biodegradável.

Utilização:

Assistência à saúde:

Detergente neutro indicado para limpeza manual de artigos, instrumentais e superfícies. Indicado para uso em banhos de limpeza de materiais e artigos médicos e odontológicos; e bancadas em clínicas médicas, odontológicas e laboratórios de análises. Indicado também para limpeza de pisos tratados com cera, paredes e mobiliário.

Características Físico-Químicas:

Aspecto Físico:..... Líquido viscoso transparente
Cor: Incolor
Odor:..... Inodoro
pH (Puro a 25°C): 6,5 a 7,5
Densidade (g/ml): 1,00 a 1,10

Composição:

Tensoativos aniônicos, espessantes, coadjuvantes, agente de controle de pH, sequestrante, conservante e veículo.

Princípio Ativo:

Dodecilbenzeno Sulfonato de Sódio.

Validade do Produto:

36 meses após a data de fabricação.

Modo de Usar:

DLL 1107 HLC pode ser utilizado puro ou diluído em água, conforme as sujidades:

Sujidade leve: diluir 1:40; 25 ml por litro de solução.

Sujidade pesada: diluir 1:10; 100 ml por litro de solução.

Aplicar o produto manualmente com auxílio de esponjas ou buchas, ou deixar de molho por alguns minutos, após aplicar a esfrega com esponjas ou escovas. Enxaguar para remover completamente os resíduos da limpeza.

Precauções de uso:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Não ingerir. Evite a inalação, aspiração e contato com os olhos. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Em caso de contato com os olhos e a pele: Lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão: não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou o médico levando junto o rótulo do produto. Telefone de emergência (CEATOX): 0800-722-6001. Contém tensoativo biodegradável.

Conservação:

Este produto deve ser mantido em sua embalagem original fechada, em ambiente coberto e seco. Evitar temperaturas extremas. Nunca misture produtos químicos, a menos que tal procedimento seja indicado pelo fabricante por escrito.

Embalagens:

Frasco plástico de 1L

Bombona de polietileno de 2x5L

Registros Oficiais:

Produto Notificado na ANVISA Nº 25351.722189/2023-31

Utilize nossos serviços técnicos para levantamento das suas necessidades específicas de limpeza e desinfecção.

Detyline Produtos e Sistemas para Limpeza Ltda.

Rua Domênico Marini, 1646 - Bairro Fátima, Bento Gonçalves - RS - CEP 95702-300

CNPJ 00.987.668/0001-74 - Inscrição Estadual 010/0080936 - Aut. Func. MS: 3.01966-1

Fone (54) 3454.9800 - www.dety.com.br

Revisado em 11/2024

dety
higiene eficiente